


INSTRUKCJA REGULACJI KĄTA ZGIĘCIA I WYPROSTU ORTEZY Z SZYNAMI JEDNOOSIOWYMI 1-R

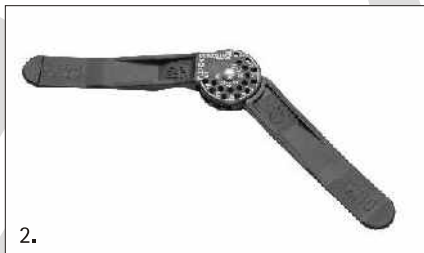

KĄT ZGIĘCIA LUB WYPROSTU USTALA LEKARZ PROWADZĄCY LUB REHABILITANT

1. Szyna oraz klucz imbusowy wraz z kompletem wkrętów.
2. Ustawić zalecany kąt zgięcia lub wyprost.
3. Wkręcić przy pomocy kluczyka imbusowego wkręty w otwory znajdujące się przy zewnętrznym i wewnętrznym okręgu opisanym na tarczy zegara.

UWAGA:

PRZED USTAWIENIEM KĄTA ZGIĘCIA LUB WYPROSTU, ZALECA SIĘ ZAŁOŻYĆ WYRÓB NA KOŃCZYNE

Jeżeli orteza wyposażona jest w dwie szyny boczne, regulacji należy dokonać osobno na obydwu szynach bocznych, ustawiając ten sam kąt zgięcia lub wyprost (punkt 1-3).

Szyny nie wymagają konserwacji.

Termin ważności: **NIE OKREŚLA SIĘ** 📅 2007

Okres gwarancji: **24 MIESIĘCE OD DATY ZAKUPU**

Konsultant Med: tel. 508 382 509

Skład surowcowy:
włókno węglowe,
tworzywo sztuczne

Podstawa dopuszczenia do obrotu:

Produkt został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów
Lecznicych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Wyrób klasy I



 "ART-REH" Sp. z o.o.

35-615 Rzeszów, ul. Leszka Czarnego 1A
tel. 017/ 851 66 30, tel./fax 017/ 851 62 23
www.art-reh.pl e-mail: biuro@art-reh.pl