


INSTRUKCJA REGULACJI KĄTA ZGIĘCIA I WYPROSTU ORTEZY/APARATU Z SZYNAMI DWUOSIOWYMI 2-R

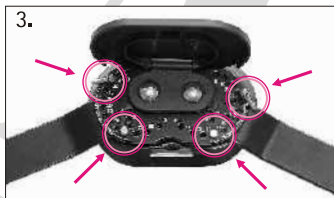

KĄT ZGIĘCIA LUB WYPROSTU USTALA LEKARZ PROWADZĄCY LUB REHABILITANT

1. Klapkę zabezpieczającą (pokrywę) podnieść (otworzyć) podważając w miejscu zaczepu.
2. Nastawić zalecany kąt zgięcia lub wyprost.
3. Zablokować ramiona szyny (dwustronnie) wkładając we właściwe otwory 4 nity blokujące
4. Zamknąć klapkę (pokrywę) zatrzaskując zaczep.

UWAGA:

PRZED USTAWIENIEM KĄTA ZGIĘCIA LUB WYPROSTU, ZALECA SIĘ ZAŁOŻYĆ WYRÓB NA KOŃCZYNE

Jeżeli orteza wyposażona jest w dwie szyny boczne, regulacji należy dokonać osobno na obydwu szynach bocznych, ustawiając ten sam kąt zgięcia lub wyprost (punkt 1-4).

Szyny boczne nie wymagają konserwacji.

Termin ważności: NIE OKREŚLA SIĘ  2007
Okres gwarancji: 24 MIESIĘCE OD DATY ZAKUPU

Konsultant Med: tel. 508 382 509

Skład surowcowy:
aluminium – 80%
stal – 5%
polietylen – 15%

Podstawa dopuszczenia do obrotu:

Produkt został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Wyrób klasy I

 "ART-REH" Sp. z o.o.

35-615 Rzeszów, ul. Leszka Czarnego 1A
tel. 017/ 851 66 30, tel./fax 017/ 851 62 23
www.art-reh.pl e-mail:biuro@art-reh.pl